

Brugsanvisning for Gas Næbklipper

1. Påfyldning af gas. Hold dåsen med lightergas over næbklipperen og pres studsens ned i påfyldningsåbningen, indtil gassen løber over.
2. Tænd næbklipperen ved at skubbe den sorte knap fremad imod kniven og derefter "klikke" med den røde knap, og sæt indstillingsskruen på +. Efter ca. to minutter har kniven fået den ønskede arbejdstemperatur (ca. 525 grader celsius), og næbklipperen er nu klar til brug.
3. Når man er færdig, slukkes der ved at skubbe den sorte knap bagud. Det anbefales at klippe "med blød hånd", dvs. lade kniven brænde sig igennem næbbet. Derved får man såret til at lukke sig ved temperaturpåvirkningen. Klippes der for hurtigt, kan der enkelte gange opstå blødninger, og man har derved en indgangsvinkel for bakterier.

Advarsel

Påfyld aldrig gas i nærheden af åben ild, og aldrig når næbklipperen er tændt. Gasbrænderen må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader celsius eller længere tid i direkte sollys.

Vedligeholdelse

Katalysatoren, som kan ses gennem nettet i kniven, er vigtig for en god og jævn forbrænding og må ikke udsættes for mekanisk påvirkning eller fugt. Hvis det er nødvendigt med rengøring af næbklipperen, brug da en tør klud omkring kniven (evt. sandpapir). Ekstra kniv og lightergas kan købes separat.

Brugsanvisning for Gas Næbklipper

4. Påfyldning af gas. Hold dåsen med lightergas over næbklipperen og pres studsens ned i påfyldningsåbningen, indtil gassen løber over.
5. Tænd næbklipperen ved at skubbe den sorte knap fremad imod kniven og derefter "klikke" med den røde knap, og sæt indstillingsskruen på +. Efter ca. to minutter har kniven fået den ønskede arbejdstemperatur (ca. 525 grader celsius), og næbklipperen er nu klar til brug.
6. Når man er færdig, slukkes der ved at skubbe den sorte knap bagud. Det anbefales at klippe "med blød hånd", dvs. lade kniven brænde sig igennem næbbet. Derved får man såret til at lukke sig ved temperaturpåvirkningen. Klippes der for hurtigt, kan der enkelte gange opstå blødninger, og man har derved en indgangsvinkel for bakterier.

Advarsel

Påfyld aldrig gas i nærheden af åben ild, og aldrig når næbklipperen er tændt. Gasbrænderen må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader celsius eller længere tid i direkte sollys.

Vedligeholdelse

Katalysatoren, som kan ses gennem nettet i kniven, er vigtig for en god og jævn forbrænding og må ikke udsættes for mekanisk påvirkning eller fugt. Hvis det er nødvendigt med rengøring af næbklipperen, brug da en tør klud omkring kniven (evt. sandpapir). Ekstra kniv og lightergas kan købes separat.

Brugsanvisning for Gas Næbklipper

7. Påfyldning af gas. Hold dåsen med lightergas over næbklipperen og pres studsens ned i påfyldningsåbningen, indtil gassen løber over.
8. Tænd næbklipperen ved at skubbe den sorte knap fremad imod kniven og derefter "klikke" med den røde knap, og sæt indstillingsskruen på +. Efter ca. to minutter har kniven fået den ønskede arbejdstemperatur (ca. 525 grader celsius), og næbklipperen er nu klar til brug.
9. Når man er færdig, slukkes der ved at skubbe den sorte knap bagud. Det anbefales at klippe "med blød hånd", dvs. lade kniven brænde sig igennem næbbet. Derved får man såret til at lukke sig ved temperaturpåvirkningen. Klippes der for hurtigt, kan der enkelte gange opstå blødninger, og man har derved en indgangsvinkel for bakterier.

Advarsel

Påfyld aldrig gas i nærheden af åben ild, og aldrig når næbklipperen er tændt. Gasbrænderen må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader celsius eller længere tid i direkte sollys.

Vedligeholdelse

Katalysatoren, som kan ses gennem nettet i kniven, er vigtig for en god og jævn forbrænding og må ikke udsættes for mekanisk påvirkning eller fugt. Hvis det er nødvendigt med rengøring af næbklipperen, brug da en tør klud omkring kniven (evt. sandpapir). Ekstra kniv og lightergas kan købes separat.

"America" A/S – 7700 Thisted

☎ 9792-0122 – www.america-thisted.dk

"America" A/S – 7700 Thisted

☎ 9792-0122 – www.america-thisted.dk

"America" A/S – 7700 Thisted

☎ 9792-0122 – www.america-thisted.dk